

HANDLEIDING

My-Voice Portable

Auditief Niveau scannen

V 1.11



Klein & Melgert Developments B.V.

Duiven Nederland

INHOUD

1.0 INLEIDING	4
1.1 Auditief Niveau scannen	5
1.2 Licentie Auditief Niveau scannen	5
2.0 AUDITIEF NIVEAU SCANNEN ACTIVEREN	6
2.1 Volume Auditief Niveau scannen instellen	7
3.0 SPRAAK AUDITIEF NIVEAU SCANNEN OPNEMEN	8
3.1 Spraak op Niveau 1 opnemen	8
3.20 Auditief Niveau opnemen	9
3.21 Auditief spraak op Auditief Niveau opnemen	10
3.22 Spraak op Auditief Niveau opnemen	10
3.23 Niveau veranderen	11
3.24 Vak veranderen	11
4.0 AUDITIEF NIVEAU SCANNEN EN BEDIENINGEN	12
4.1 Één schakelaar/toets bediening	12
4.2 Twee schakelaar/toets bediening	12
4.3 Onderbreken Auditief Niveau scannen	12
4.4 Auditief Niveau scannen en Auditief scannen	13
WAT TE DOEN BIJ VRAGEN	14

• 1.0 INLEIDING

Met de *My-Voice Portable* heeft U een geavanceerd produkt voor het opnemen en weergeven van spraak of geluid. Door toepassing van zeer hoogwaardige elektronica is de *My-Voice Portable* een sprekend communicatie hulpmiddel met bijna onbeperkte mogelijkheden.

Voor bediening in combinatie met Auditief Niveau scannen kan een keuze worden gemaakt uit twee bedieningen:

- **Een schakelaar/toets voor 1 functie bediening.**
- **Twee schakelaar/toets voor 2 functie bediening.**

Deze handleiding geeft U informatie over gebruik van de *My-Voice Portable* in combinatie met Auditief Niveau scannen. Mocht U tijdens het gebruik toch vragen hebben waarop de handleiding geen antwoord geeft, neem dan gerust even contact op met Uw leverancier.

• **1.1 Auditief Niveau scannen**

Auditief Niveau scannen is een bijzondere auditieve scanmethode, die is ontwikkeld, voor gebruikers met visuele beperkingen.

De gebruiker selecteert op het toetsenbord een vak, een tekst, de 'voormelding', zal worden uitgesproken. Is het geselecteerde vak het gewenste vak, dan kan de gebruiker dit bevestigen en het Auditief Niveau scannen zal worden gestart. Een voor een wordt een tekst, die bij het niveau onder het geselecteerde vak hoort, uitgesproken. Deze tekst wordt meestal 'zacht', met een lager volume, uitgesproken. Op deze manier worden de niveaus onder het geselecteerde gescand.


Is het niveau vak bereikt dat de gebruiker wil laten horen, dan wordt de bediening schakelaar/toets ingedrukt. De 'gewone' tekst zal 'luid', met een hoger volume, worden uitgesproken of de functie zal worden uitgevoerd.

• **1.2 Licentie Auditief Niveau scannen**


Om Auditief Niveau te kunnen scannen moet de licentie voor Auditief Niveau scannen aanwezig zijn.

Controleer eerst of de licentie aanwezig is:

Kies in menu [hoofd 1]: **verder** en vervolgens in menu [hoofd 2]: **verder**.

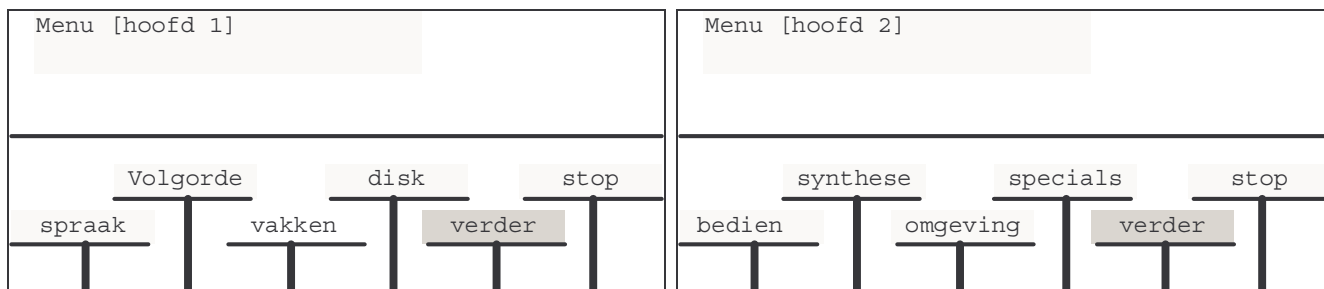

Kies in menu [hoofd 3]: **instel** en vervolgens in menu [instellingen]: **info**.

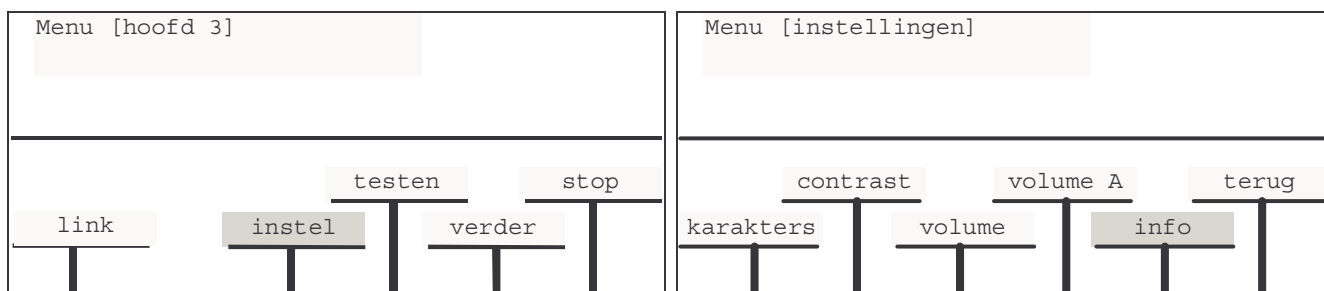

```
My-Voice Portable informatie
Maximaal 128 vakken, nu gebruikt: 32
Minuten : 40          Volgorde: Ja
Synthese: Nee        Omgeving: Nee
Auditief: Nee        Niveau : Ja
Spraaak gebruikt: 18 %
                          Serie Nummer: 001
```


Achter Niveau moet **Ja** staan. Is dit niet het geval dan zal Auditief Niveau scannen niet functioneren.

• 2.0 AUDITIEF NIVEAU SCANNEN ACTIVEREN


Als optie is de *My-Voice Portable* leverbaar met de mogelijkheid van Auditief Niveau scannen. Om Auditief Niveau te scannen is het nodig deze mogelijkheid “aan” te zetten.

Het Auditief Niveau scannen kan op de volgende manier worden aangezet:


Kies in menu [hoofd 1]: **verder** en vervolgens in menu [hoofd 2]: **bedien**.

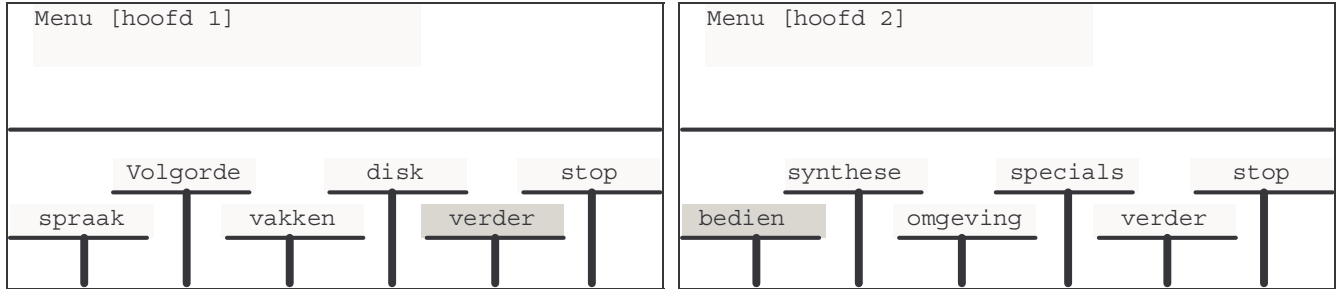


Kies in menu [bediening]: **scanner** en vervolgens in menu [scanner 1]: **verder**.

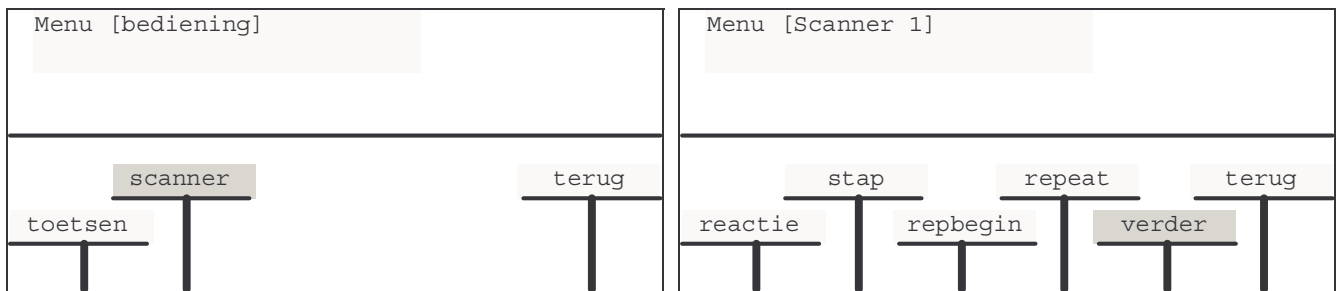

Kies in menu [scanner 2]: **auditief** en vervolgens in menu [auditief methode]: **niveau**.

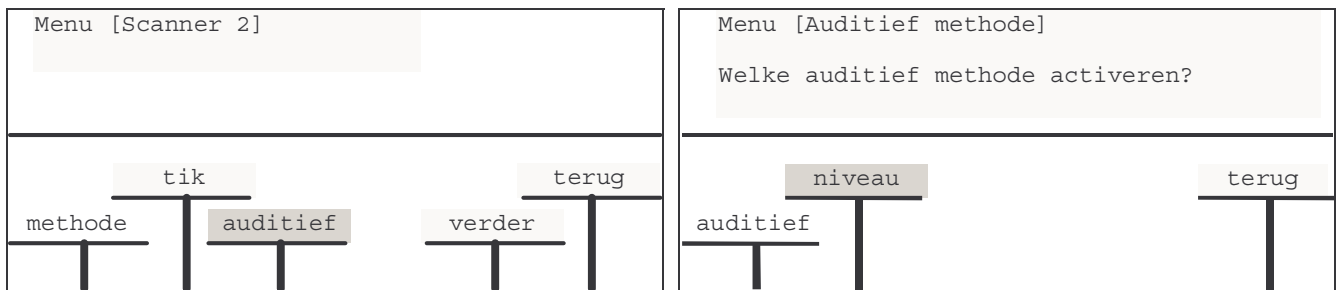

Selecteer **Ja** om Auditief Niveau scannen te activeren. Bij **Nu** staat de huidige instelling en bij **Max. niveau** staat het maximale niveau tot waar Auditief Niveau scant. Standaard staat het maximale niveau op 30. Het maximale niveau is in te stellen tussen 1 en 100.

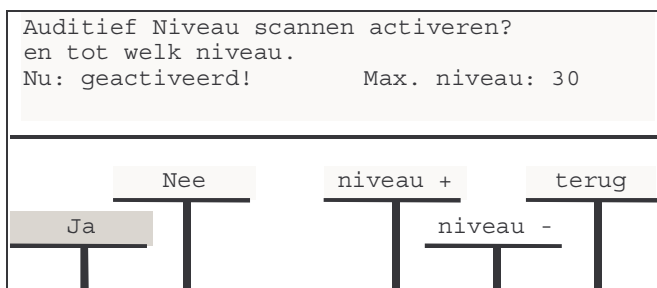


• **2.1 Volume Auditief Niveau scannen instellen**


Het spraakvolume van het Auditief Niveau scannen is in te stellen.

Het spraakvolume van het Auditief Niveau scannen wordt op de volgende manier ingesteld:


Kies in menu [hoofd 1]: **verder** en vervolgens in menu [hoofd 2]: **verder**.

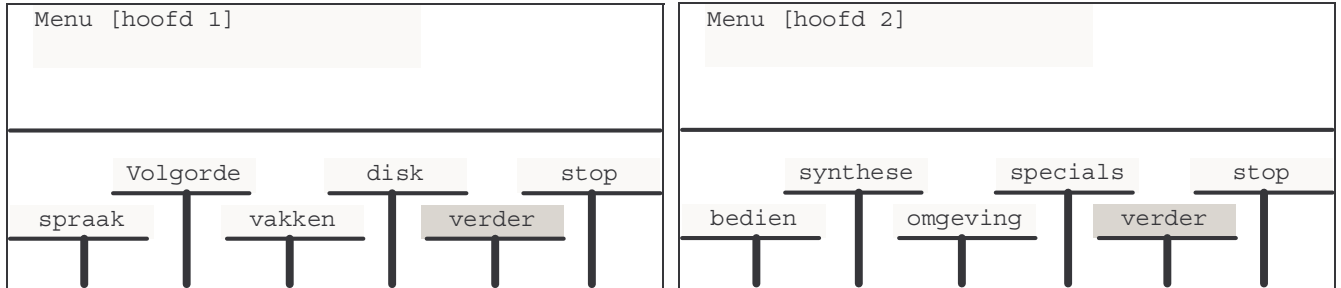

Kies in menu [hoofd 3]: **instel** en vervolgens in menu [instellingen]: **volume A**.

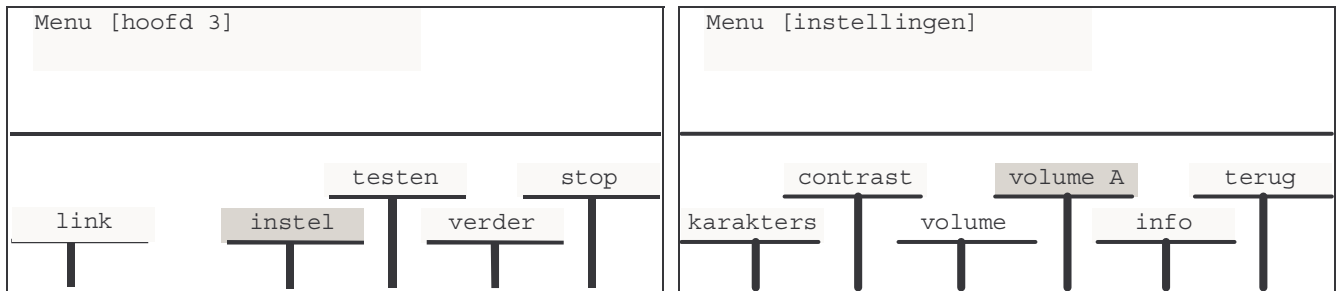


Door meer of minder te kiezen, in menu [volume auditief] wordt het volume hoger of lager ingesteld.

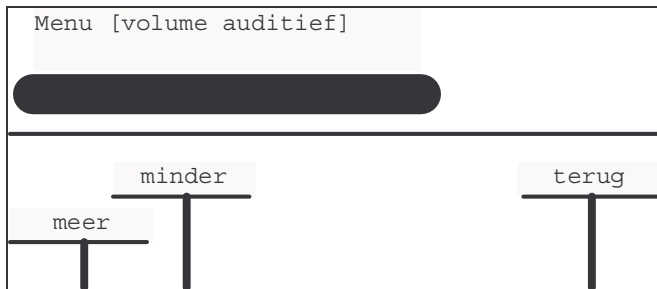

• **3.0 SPRAAK AUDITIEF NIVEAU SCANNEN OPNEMEN**

De *My-Voice Portable* kan bij elk vak dat geen speciale functie heeft (auditief) spraak opnemen.

Sluit hiertoe de microfoon aan op de “microfooningang” aan de rechterzijde van de *My-Voice Portable*.

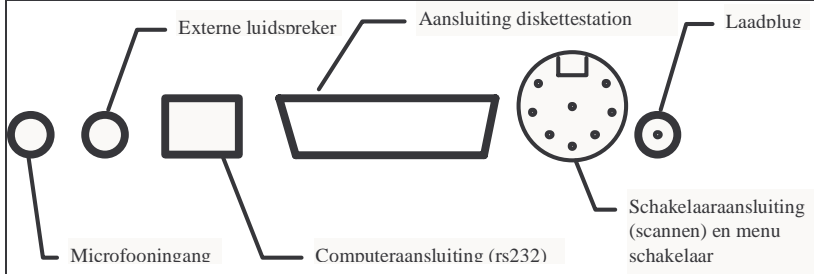


Om Auditief Niveau scannen te gebruiken moet verschillende spraak worden opgenomen:

- Op niveau 1 op elk, te gebruiken, vak: ‘gewone’ spraak. Dit is de ‘voormelding’.
- Onder dit vak op elk, te gebruiken, niveau: auditieve spraak en de bijbehorende ‘gewone’ spraak. (zie hoofdstuk 4.0)

• **3.1 Spraak op Niveau 1 opnemen**

De *My-Voice Portable* kan bij elk vak dat geen speciale functie heeft spraak opnemen. Bij Auditief Niveau scannen moet op niveau 1, de ‘voormelding’ worden opgenomen. Dit gebeurt op dezelfde manier als opnemen van ‘gewone’ spraak.

Kies in menu [hoofd 1]: **spraak** en vervolgens in menu [spraak]: **opname**.

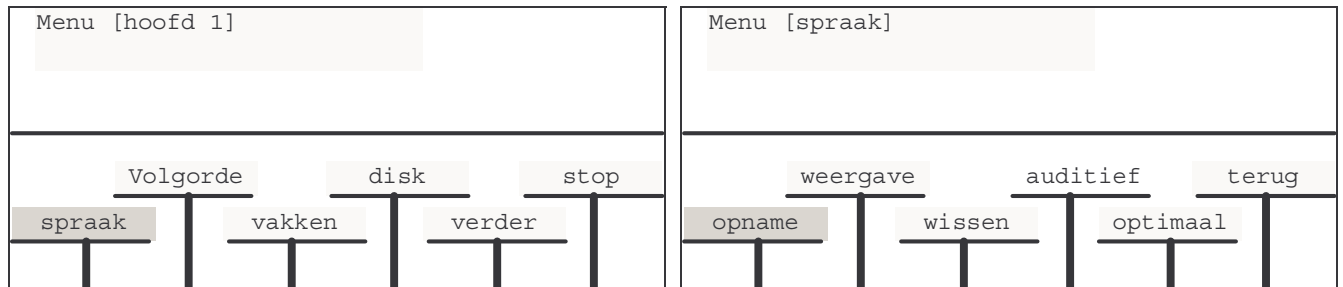

Druk nu op de toets waaronder de spraak moet worden opgenomen en houdt deze ingedrukt net zolang als er moet worden opgenomen. Bij vak wordt ingedrukte vaknummer weergegeven. Zodra de toets wordt losgelaten, stopt de opname direct.

De volgende tekst verschijnt in het display:

```
Spraak opname, druk op een toets.
Houdt de toets ingedrukt tijdens
het inspreken. Loslaten stopt de
opname.

Niveau: 1    Vak:
```


Daarna volgt automatisch de weergave van de spraak, die juist is opgenomen.

Direct daarna kan het volgende vak worden opgenomen. Door enkele seconden te wachten stopt de opname en komt het menu terug.


Neem op deze manier alle, te gebruiken, vakken op.

• **3.20 Auditief Niveau opnemen**

Kies in menu [hoofd 1]: **spraak** en vervolgens in menu [spraak]: **auditief**.

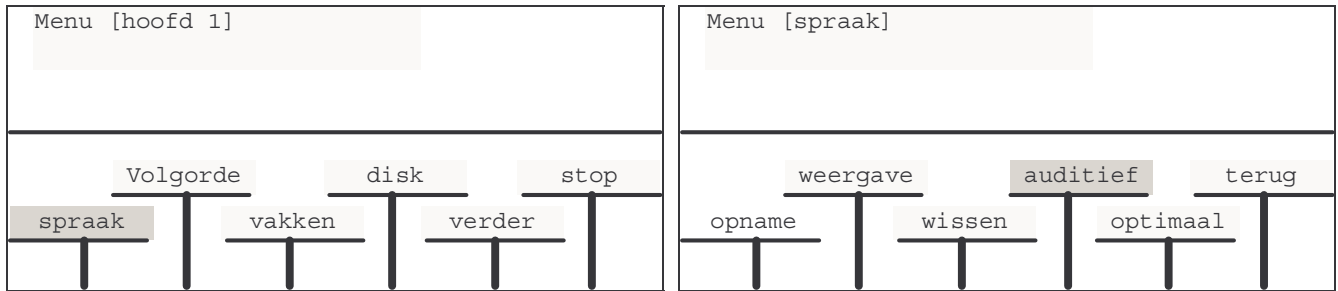

Kies in menu [auditief spraak]: **niveau**.

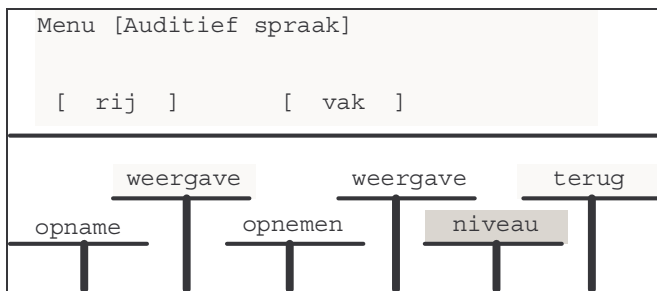


De volgende tekst verschijnt in het display:

Druk op het vak waaronder de niveau's moeten worden bewerkt.
 Wacht om terug te keren.
 Vak: xx is geselecteerd.

Druk op het gewenste vak, bij **xx** verschijnt het geselecteerde vaknummer.

Het volgende menu verschijnt:

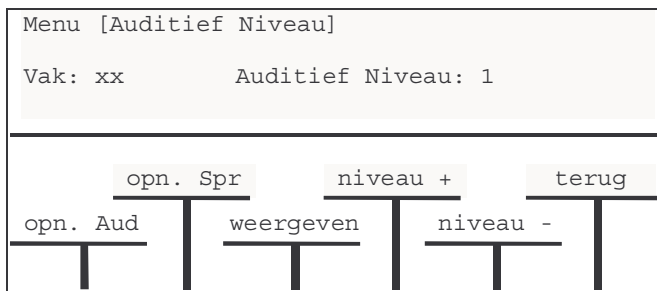

Bij vak, bij **xx** staat het geselecteerde vaknummer.

Onder dit vak moet voor elk gewenste Auditief Niveau tweemaal spraak worden opgenomen:



- auditieve spraak.
- de bijbehorende 'gewone' spraak.

• **3.21 Auditief spraak op Auditief Niveau opnemen**

Als eerste moet de auditieve spraak worden opgenomen.


Kies in menu[auditief niveau]: **opn. Aud.**

De volgende tekst verschijnt:

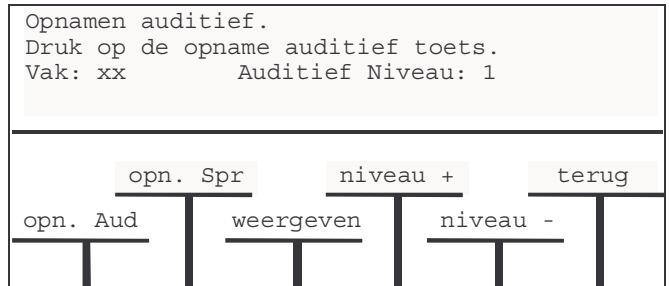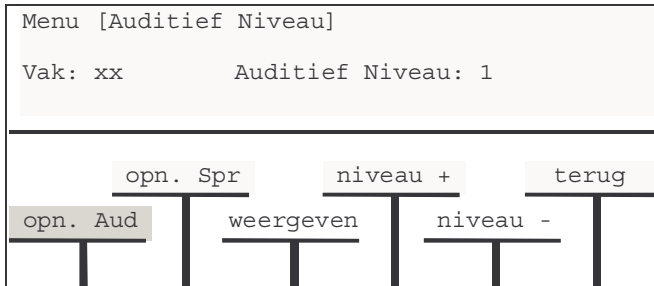

Druk nu nog eenmaal op de **opn. Aud** toets en houdt deze ingedrukt net zolang als er moet worden opgenomen. Zodra de toets wordt losgelaten, stopt de opname direct.

De volgende tekst verschijnt in het display:

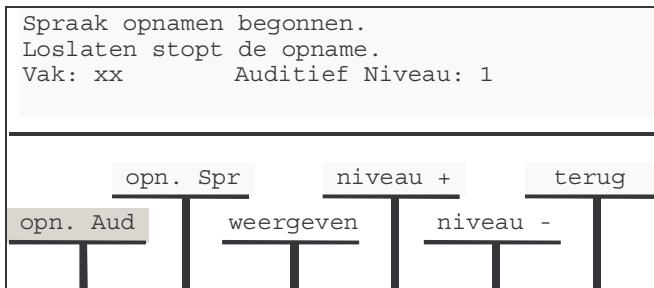


Daarna volgt automatisch de weergave van de spraak, die zojuist is opgenomen.

• **3.22 Spraak op Auditief Niveau opnemen**

Als tweede moet de 'gewone' spraak worden opgenomen.


Kies in menu[auditief niveau]: **opn. Spr.**

De volgende tekst verschijnt:

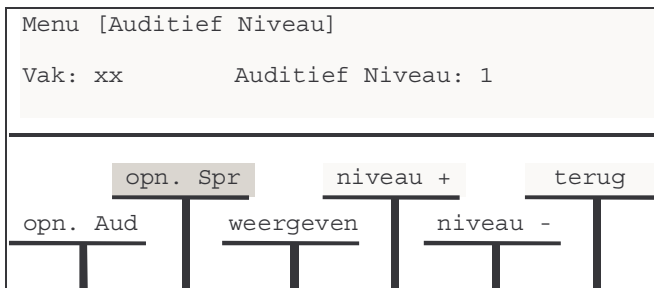

Druk nu nog eenmaal op de **opn. Spr** toets en houdt deze ingedrukt net zolang als er moet worden opgenomen. Zodra de toets wordt losgelaten, stopt de opname direct.

De volgende tekst verschijnt in het display:

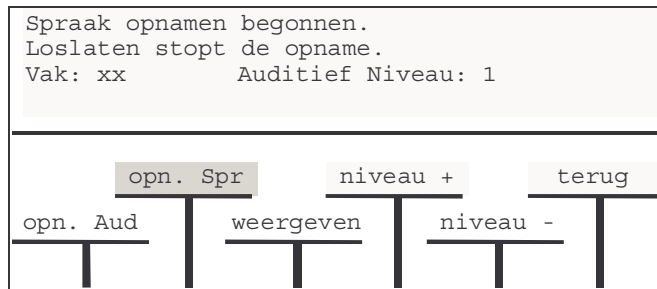

Daarna volgt automatisch de weergave van de spraak, die zojuist is opgenomen.

• 3.23 Niveau veranderen

Het Auditief Niveau waarop spraak moet worden opgenomen kan worden geselecteerd met **niveau +** en **niveau -**. Kies **niveau +** om het volgende Auditief Niveau te kunnen opnemen.



Het bereik van Auditief Niveau ligt tussen 1 en het maximale niveau, dat is ingesteld. (Zie hoofdstuk 2)

• 3.24 Vak veranderen

Om een ander vak te selecteren, waaronder Auditief Niveau moet worden opgenomen, moet één venster worden terug gegaan.

Kies in het menu[auditief niveau]: **terug**.

De volgende tekst verschijnt in het display:

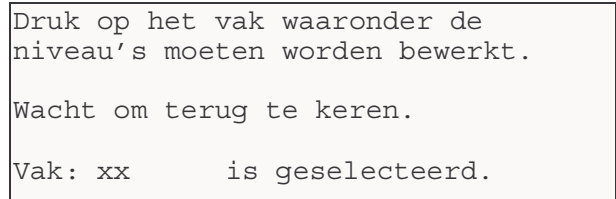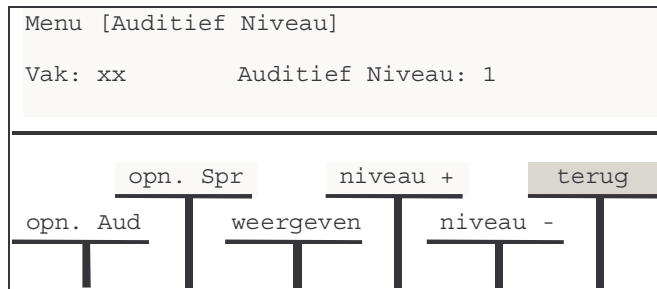

Druk op het gewenste vak, bij **xx** verschijnt het geselecteerde vaknummer, waaronder de volgende Auditief Niveau moet worden opgenomen.

• 4.0 AUDITIEF NIVEAU SCANNEN EN BEDIENINGEN

Er kan worden gekozen uit:

- 1 functie bediening, met 1 schakelaar/toets
- 2 functie bediening, met 2 schakelaars/toetsen

Deze keuze wordt bepaald door de ingestelde bedieningstoetsen of door de stekker die in de bediening ingang van de My-Voice wordt gestoken.

Bij gebruik van andere schakelaars/toetsen functioneert Auditief Niveau scannen niet.

• 4.1 Één schakelaar/toets bediening

Het scannen wordt gestart door op het toetsenbord, op niveau 1, één van de Auditief Niveau vakken te drukken. De tekst, de 'voormelding', van het **vak** wordt uitgesproken. Door nog eenmaal op hetzelfde **vak** te drukken, als bevestiging, start het Auditief Niveau scannen.

- Auditief Niveau scannen scant per **niveau**, de auditieve tekst van het eerste **niveau** wordt uitgesproken.
- Na de "staptijd" wordt de auditieve tekst van het volgende **niveau** uitgesproken.
- Na het laatste **niveau** stopt het Auditief Niveau scannen en kan opnieuw worden begonnen.
- Bij het gewenste **niveau** aangekomen, wordt de selectie schakelaar/toets bediend en de tekst zal worden uitgesproken.

• 4.2 Twee schakelaar/toets bediening

Het scannen wordt gestart door op het toetsenbord, op niveau 1, één van de Auditief Niveau vakken te drukken. De tekst, de 'voormelding', van het **vak** wordt uitgesproken. Door nog eenmaal op hetzelfde **vak** te drukken, als bevestiging, start het Auditief Niveau scannen.

- Auditief Niveau scannen scant per **niveau**, de auditieve tekst van het eerste **niveau** wordt uitgesproken.
- Door de andere schakelaar/toets te bedienen, wordt de auditieve tekst van het volgende **niveau** uitgesproken. (Het is mogelijk om de andere schakelaar/toets ingedrukt te houden, in dit geval wordt met de "staptijd" telkens de auditieve tekst van het volgende **niveau** uitgesproken.)
- Na het laatste **niveau** stopt het Auditief Niveau scannen en kan opnieuw worden begonnen.
- Bij het gewenste **niveau** aangekomen, wordt de selectie schakelaar/toets bediend en de tekst zal worden uitgesproken.

• 4.3 Onderbreken Auditief Niveau scannen

Het Auditief Niveau scannen kan op de volgende manieren worden onderbroken:

- Door op één van de Auditief Niveau vakken, op niveau 1, op het toetsenbord te drukken. De tekst, de 'voormelding', van het **vak** wordt uitgesproken. Door nog eenmaal op het zelfde **vak** te drukken start het Auditief Niveau scannen onder het desbetreffende **vak**.
- Door op de 'Nood' toets te drukken. De tekst behorende bij dit vak zal worden uitgesproken. (Zie Handleiding My-Voice Portable 1.00 Hoofdstuk 4.2)

• 4.4 Auditief Niveau scannen en Auditief scannen

Deze mogelijkheid kan alleen indien tevens de licentie voor Auditief scannen aanwezig is.

Het Auditief Niveau scannen kan vanuit Auditief scannen, i.p.v. door op het toetsenbord te drukken, worden gestart:

- Het Auditief scannen wordt gestart door select schakelaar/toets te bedienen. (zie hoofdstuk 4.0 van de handleiding *My-Voice Portable Auditief scannen 1.11*)
- Auditief worden de teksten, de 'voormelding', van de **vakken** uitgesproken. Bij selectie van het gewenste **vak** start het Auditief Niveau scannen. (zie verder hoofdstuk 4.1 of 4.2 van deze handleiding)

De tekst, de 'voormelding', hoeft nu niet op Niveau 1 te worden opgenomen, maar moet als spraak Auditief scannen worden opgenomen. (zie hoofdstuk 3.0 van de handleiding *My-Voice Portable Auditief scannen 1.11*)

• WAT TE DOEN BIJ VRAGEN

Heeft U na het lezen van deze handleiding nog vragen dan kunt U altijd contact op nemen met Uw leverancier.



Fabrikant:

Klein & Melgert Developments B.V.

Telefoon : 0316 268021
Fax : 0316 281160
E-mail : info@kmd.nl
Internet : http://www.kmd.nl

't Holland 24, 6921 GW DUIVEN

Deze handleiding beschrijft alle mogelijkheden van de *My-Voice Portable*, het is echter mogelijk dat Uw *My-Voice Portable* bepaalde mogelijkheden niet heeft. Deze handleiding geeft U geen rechten op deze mogelijkheden.

De *My-Voice Portable* is een produkt dat steeds aan veranderingen onderhevig is. Het kan dus zijn dat kleine wijzigingen en aanvullingen in het apparaat zijn opgenomen zonder dat deze in de handleiding zijn verwerkt.

© Copyright 1998-2004 All rights reserved,

Mee geleverde software mag op geen enkele wijze veelevoudigd worden. De meegeleverde software mag alleen gebruikt worden bij de *My-Voice Portable* waarvoor deze software bestemd is.

Op al onze diensten, leveringen, offertes, etc., zijn onze bij het handelsregister te Arnhem gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Een kopie daarvan wordt u op eerste verzoek gratis toegezonden.