


HANDLEIDING

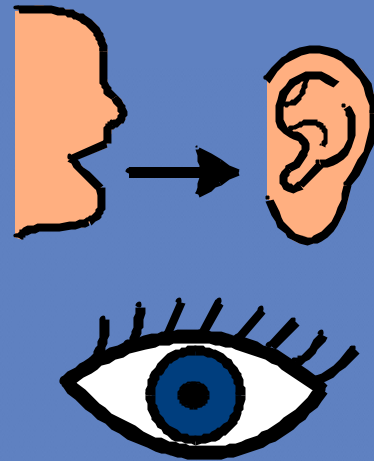

WCM Auditief scannen

DEEL 1: ALGEMEEN	3
1.1 Inleiding	3
DEEL 2: Auditief spreken	3
2.1 Inleiding	3
2.2 Spraak: opname	3
2.3 Spraak: Opname rij	4
2.4 Spraak: Weergave	4
2.5 Spraak: Per vak wissen	4
2.6 Spraak: Volume	4
CE Verklaring	5
Wat te doen bij vragen?	5
Tot slot	5

DEEL 1: ALGEMEEN

1.1 Inleiding

Met de *Touchy of Wizard Color* heeft U een geavanceerd product voor het opnemen en weergeven van spraak of geluid. Door toepassing van zeer hoogwaardige elektronica is de *Touchy of Wizard Color* een sprekend communicatiehulpmiddel met bijna onbeperkte mogelijkheden.

Voor bediening kan een keuze worden gemaakt uit diverse bedieningen zoals:

- Toetsenbord bediening (aanraakscherm).
- Een en twee functie bediening.
- 5 schakelaar bediening.
- Joystick bediening.
- Trackball bediening.
- Hoofd bediening (camera).

Deze handleiding geeft U informatie over gebruik van de *Touchy of Wizard Color* met auditief scannen. Mocht U tijdens het gebruik toch vragen hebben waarop de handleiding geen antwoord geeft, neem dan gerust even contact op met Uw leverancier.

U kunt de meest recente handleidingen vinden op onze internetsite www.kmd.nl.

Andere handleidingen:

KMDg Color,
WCM
WCM automatisch vervoegen
WCM alarmmodule
PC-Link I-mouse

- **Indien dit apparaat wordt gebruikt in situaties die gevaarlijk zijn, letsel tot gevolg kunnen hebben, of levensbedreigend zijn (voor de gebruiker maar ook voor zijn omgeving, direct of indirect). Moet er altijd een voorziening aanwezig zijn die speciaal voor deze situaties bedoeld is.**
- **Dit apparaat mag dus alleen als secundaire mogelijk worden gebruikt. Hierbij moet gedacht worden aan b.v. alarmering of noodoproep.**
- **Elk apparaat hoe goed het ook gemaakt is, raakt ooit een keer defect, probeer hiermee rekening te houden.**
- **Dit apparaat is niet bedoeld voor de besturing van een voertuig, b.v. een rolstoel.**


DEEL 2: Auditief spreken

2.1 Inleiding


De *Wizard Color/Touchy* kan bij auditief scannen een boodschap uitspreken bij de rij en bij het vak.

Om auditief scannen te kunnen gebruiken moet er in de *Wizard Color/Touchy* de licentie "Auditief scannen" aanwezig zijn.

Daarnaast moet auditief scannen aan staan (keuze = Wel), controleer dit in.

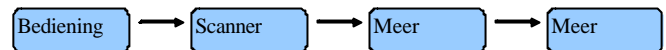


Het volume van de spraak bij auditief scannen is apart in te stellen.

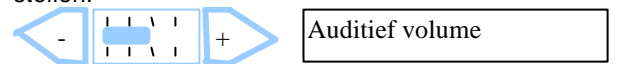

2.2 Spraak: Opname

Raadpleeg de algemene handleiding, om spraak op te nemen bij de vakken die bij selectie uitgesproken worden

Om auditief spraak op te nemen, ga naar het menu:

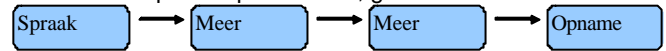

(Auditief opname vak)

Hierna verschijnt een blad, ga daarna naar het blad ("ga naar") waarop spraak moet worden opgenomen. Druk op het vak waaronder spraak moet worden opgenomen. Houdt deze toets ingedrukt tijdens het spreken en laat de toets direct daarna weer los. Herhaal dit voor de rest van de vakken. Wacht daarna net zolang totdat het menu weer verschijnt.

De spraak kan onder bijna alle toetsen worden opgenomen, dus ook onder letter toetsen, computer toetsen etc.

Is het vak een "ga naar" toets, dan verschijnt de tekst: "Opname of weergave".

Kies Ja



Om onder de "ga naar" toets spraak op te nemen. Houdt de "Ja" toets ingedrukt tijdens het spreken.


Kies Nee



Om de "ga naar" toets te volgen naar het nieuwe blad. Klaar met opnemen? Wacht dan net zolang totdat het menu weer verschijnt.

2.3 Spraak: Opname rij


Het opnemen van de spraak bij de rij gaat op de zelfde manier als bij het opnemen van een vak.

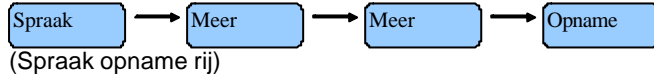

In dit geval maakt het niet uit onder welk vak van de rij de spraak wordt opgenomen.

2.4 Spraak: Weergave


Om spraak weer te geven, ga naar het menu:

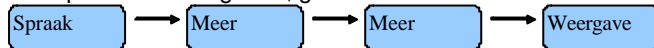

Hierna verschijnt een blad, ga daarna naar het blad waarvan de spraak moet worden weergegeven.
Klaar? Wacht dan net zolang totdat het menu weer verschijnt.

2.5 Spraak: Per vak wissen

Om de spraak van een 1 of meerdere vakken te wissen, kies **wis vak**

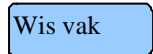


Kies voor ja om de spraak te kunnen wissen.



Nu kan de spraak gewist worden door het gewenste vak aan te wijzen.

2.6 Spraak: Volume

Het volume van de spraak bij auditief scannen is apart in te stellen.

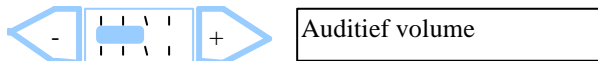

CE Verklaring**EC Verklaring van Conformiteit**

Wij, de fabrikant:

Klein & Melgert Developments B.V.
't Holland 24
6921 GW Duiven
Nederland

**Verklaart onder eigen
verantwoordelijkheid dat dit
product:**

*Touchy
Wizard Color
Mudikom 4
Extern accupakket*

**waarop deze verklaring van
toepassing is, in conformiteit zijn
met de volgende normen:**

EN50081-1
EN50082-1
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN61000-4-4

**Overeenkomstig de normen,
voldoen de betreffende producten
aan de bepalingen van de
hieronder vermeld richtlijnen**

EEC/89/336

Fabrikant:


Datum: 1 december 2001

Naam :Fred Melgert
Functie :Directeur

Handtekening:

**Wat te doen bij vragen?**

Hebt u na het lezen van deze handleiding nog vragen, dan kunt U altijd contact opnemen met uw leverancier.

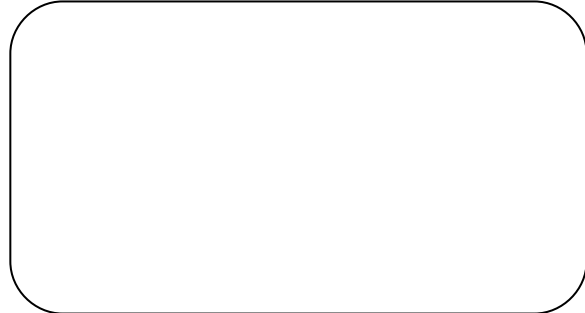**Fabrikant:**

Klein & Melgert Developments B.V.
't Holland 24, 6921 GW Duiven

Tel: 0316 268021

Fax 0316 281160

E-mail: info@kmd.nl

Internet: www.kmd.nl

Tot slot

Deze handleiding beschrijft alle mogelijkheden van de *Touchy* of *Wizard Color*, het is echter mogelijk dat Uw *Touchy* of *Wizard Color* bepaalde mogelijkheden niet heeft. Deze handleiding geeft U geen rechten op deze mogelijkheden.

De *Touchy* of *Wizard Color* is een product dat steeds aan veranderingen onderhevig is. Het kan dus zijn dat kleine wijzigingen en aanvullingen in het apparaat zijn opgenomen zonder dat deze in de handleiding zijn verwerkt.

© Copyright 1987-2008 All rights reserved,

Meegeleverde software mag op geen enkele wijze veelevoudigd worden. De meegeleverde software mag alleen gebruikt worden bij de *Touchy* of *Wizard Color* waarvoor deze software bestemd is.

Op al onze diensten, leveringen, offertes, etc., zijn onze bij het handelsregister te Arnhem gedeponeerde verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Een kopie daarvan wordt u op eerste verzoek gratis toegezonden.